

आइये जाने

हब कटर का इस्तेमाल


सत्र के दौरान हब कटर को हमेशा अपने पास ही रखें।

इस्तेमाल के तुरंत पश्चात, प्रयुक्त सिरिज के हब को कटर के ऊपर दिए गए छिद्र में डालें।

एक हाथ से सिरिज को पकड़कर दूसरे हाथ से कटर के दोनों हैंडलों को तब तक दबाएं जब तक हब (तथा सुई) कट कर डिब्बे में नहीं गिर जाते।

प्रयुक्त सिरिज के कटे हुए प्लास्टिक भाग को सत्र स्थल पर लाल रंग की थैली में रखें।

टूटे हुए वायल तथा एम्प्यूल को भी एक कागज़ पर इकट्ठा कर हब कटर के डिब्बे में डालें।

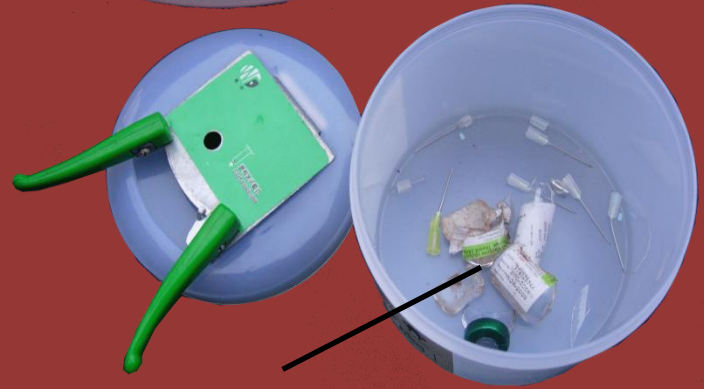

- कटी हुई सुई तथा हब
- टूटे वायल तथा एम्प्यूल